


Série **Bedmaster**

Positionneur de lit

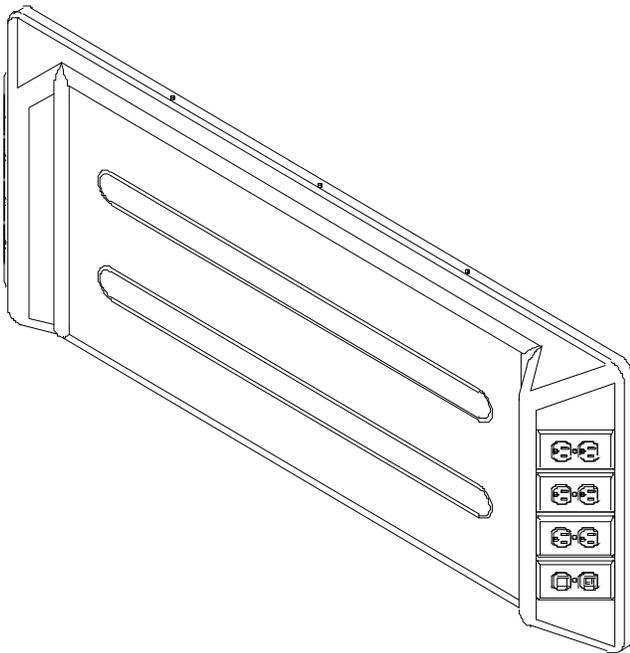

Définition du numéro de produit

BM-XXX – "XXX"=Largeur en pouces

Dimensions standard de l'unité :

Hauteur: 20"

Largeur: 50"

Profondeur: 4 3/4"

Bedmaster

Le "Bedmaster" est un positionneur de lit fixé au mur, permettant l'intégration de services électriques à la tête du patient. Cette unité est fabriquée d'un plastique thermoformé de type Kydex ayant un taux de résistance élevé aux impacts majeurs. L'unité est équipée des côtés de plages à services permettant l'installation d'un maximum huit services (quatre de chaque côté). Tous les services sont positionnés à un angle de 45° par rapport au mur pour maximiser l'accessibilité. Ce produit est homologué CSA/cULus.

Structure et fini

La structure interne de l'unité est composée d'une plaque d'acier galvanisé de fort calibre permettant d'ancrer solidement l'unité au mur. La couleur du recouvrement décoratif est amande texturée RAL 9001. (Autres couleurs disponibles)

Équipements Électriques

Tout les services électriques sont installés et pré filées en usine dans des boîtiers prévue a cette effet et relié a une boîte de raccord a l'aide de conduit EMT rigide ou flexible en aluminium. Le filage est de cuivre type RW-90 de No.12 toronné pour les circuits normales et d'urgences. Toutes ces composantes sont mises à la terre à l'aide de fil de cuivre No.10 toronné et vert tel que les exigences des codes CSA et cULus en vigueur. Les réceptacles sont de type NEMA 5-15/20R, 125 volts AC de grade hôpital selon les exigences du client. Les prises électriques seront ROUGES pour les circuits d'urgence, et de couleur IVOIRE pour les circuits normales.

Installation au chantier


Tous nos produits doivent être installés selon les recommandations de EEME et les dessins d'atelier approuvés pour le projet. L'entrepreneur en mécanique et en électricité est responsable du branchement final des services aux différents systèmes de l'hôpital. Chaque entrepreneur a la responsabilité d'assurer que les produits sont l'objet d'une inspection finale par les autorités concernées et que l'installation réponde aux normes nationales et locales en vigueur.

Dessin d'atelier typique

SÉRIE BED MASTER - POSITIONNEUR DE LIT

UNITÉ # 2500-8000

3985, rue Alfred-Laliberté, Boisbriand (QC) Canada J7H 1P7
Téléphone : (450) 430-0602 Télécopie : (450) 430-0609

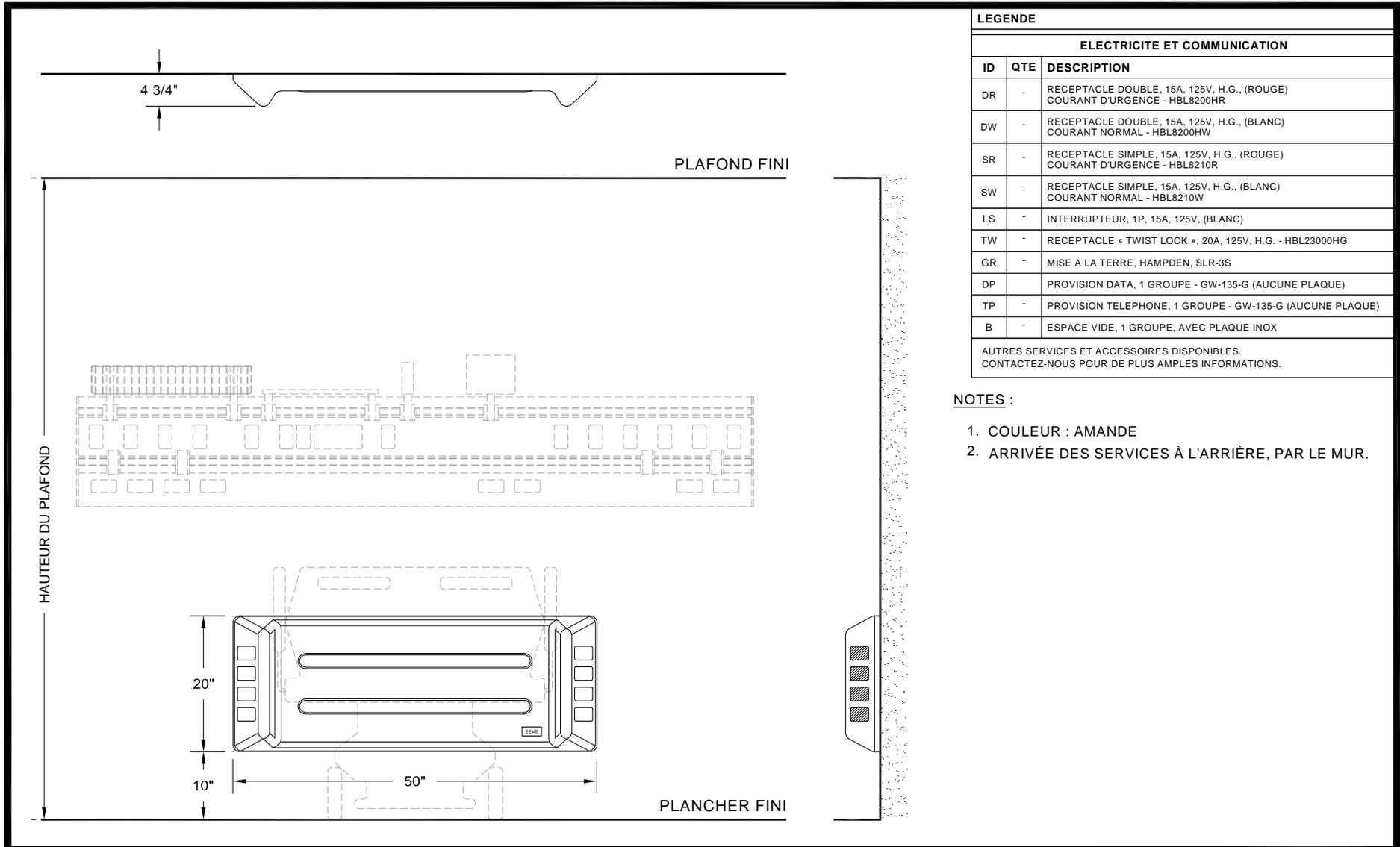

LEGENDE		
ELECTRICITE ET COMMUNICATION		
ID	QTE	DESCRIPTION
DR	-	RECEPTACLE DOUBLE, 15A, 125V, H.G., (ROUGE) COURANT D'URGENCE - HBL8200HR
DW	-	RECEPTACLE DOUBLE, 15A, 125V, H.G., (BLANC) COURANT NORMAL - HBL8200HW
SR	-	RECEPTACLE SIMPLE, 15A, 125V, H.G., (ROUGE) COURANT D'URGENCE - HBL8210R
SW	-	RECEPTACLE SIMPLE, 15A, 125V, H.G., (BLANC) COURANT NORMAL - HBL8210W
LS	-	INTERRUPTEUR, 1P, 15A, 125V, (BLANC)
TW	-	RECEPTACLE « TWIST LOCK », 20A, 125V, H.G. - HBL23000HG
GR	-	MISE A LA TERRE, HAMPDEN, SLR-3S
DP	-	PROVISION DATA, 1 GROUPE - GW-135-G (AUCUNE PLAQUE)
TP	-	PROVISION TELEPHONE, 1 GROUPE - GW-135-G (AUCUNE PLAQUE)
B	-	ESPACE VIDE, 1 GROUPE, AVEC PLAQUE INOX
AUTRES SERVICES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES. CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.		

NOTES :

1. COULEUR : AMANDE
2. ARRIVÉE DES SERVICES À L'ARRIÈRE, PAR LE MUR.