



## Série **Edge** Console murale

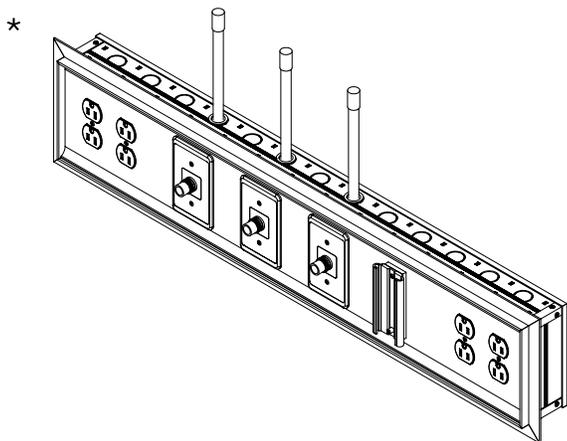

\* Console murale séries Edge 13 groupes

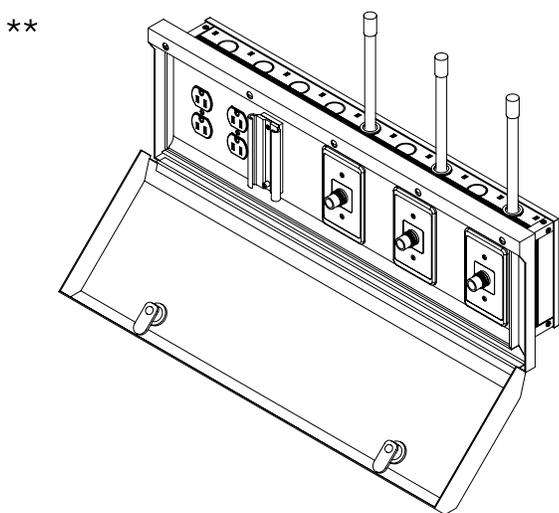

\*\* Console murale antivandale séries Edge 9 groupes

### Définition du numéro produit

SWC / WC-XX00-NF

'XX'=nombre de groupes

NF=Non Ferreux

**Longueurs disponibles:**  
5 à 21 groupes (15" à 53")

### Spécification de construction

La console murale encastrée consiste en un boîtier muni d'un fascia commun où tous les différents services de gaz et d'électricités sont regroupés. Le boîtier et le cadre sont monolithique et permettent d'intégrer les services dans des compartiments isolés au besoin. Le boîtier et le cadre sont fait d'extrusion d'aluminium de fort calibre, anodisée d'un finie clair et uniforme. La plaque arrière du boîtier est en acier satiné de calibre 18.

La console de sécurité est recouverte d'une porte d'accès sur penture en acier inoxydable de calibre 16 finie no.4 et est munie d'une barrure empêchant l'accès aux services par d'autres que le personnel autorisé. Ce produit est homologué cULus.

\*\*\*Seul le modèle régulier est disponible avec des matériaux non ferreux.

### Gaz médicaux

Toutes les prises de gaz sont fournies et installées par Médical Design. Toutes les prises de gaz doivent être canalisées à un seul point de raccord. Toutes les installations et procédures d'essai rencontrent les normes NFPA 99, CRN, BNQ 5710-500 et CSA 305.1/B51-95.

### Équipements électriques

Les prises électriques sont fournies et préfilées par Médical Design. Tout le filage est de cuivre de type RW-90 No.12 toronné pour les circuits normal et d'urgence. Les composants sont mis à la terre à l'aide de fil de cuivre No.10 AWG toronné et vert selon les exigences des codes CSA et cULus en vigueur. Les réceptacles sont de type NEMA 5-15/20R, 125 volts AC, de grade hôpital. Les prises électriques sont rouges pour le courant d'urgence et ivoire pour le courant normal.
















### Communication

Les appareils de communication sont fournis et installés par l'entrepreneur. Ce dernier est responsable de la coordination de ses équipements avec Médical Design. Les provisions pour ceux-ci seront fournies par Médical Design selon les recommandations du client.

### Installation au chantier




Cette unité doit être installée au chantier selon les recommandations de Médical Design et conformément aux dessins d'atelier approuvés. L'entrepreneur en mécanique et en électricité est responsable du branchement final des services aux différents systèmes de l'hôpital. Il est de la responsabilité des entrepreneurs impliqués de s'assurer que l'installation finale est sujette aux inspections requises et qu'elle réponde aux normes locales en vigueur.

## SÉRIE EDGE - CONSOLE MURALE / CONSOLE MURALE DE SÉCURITÉ

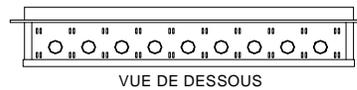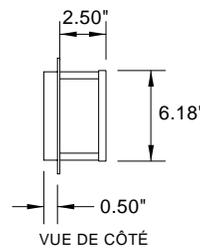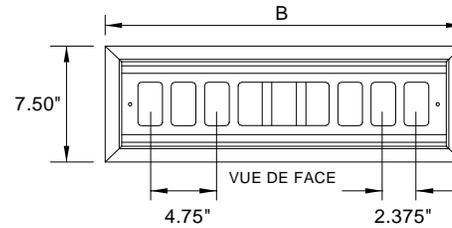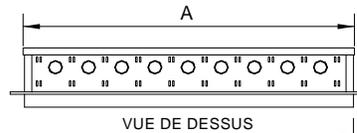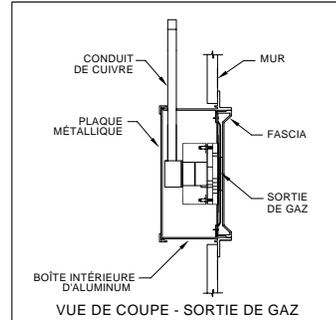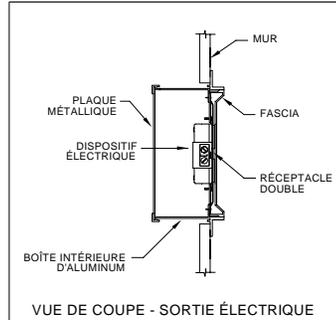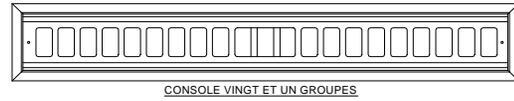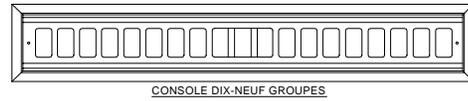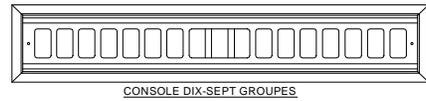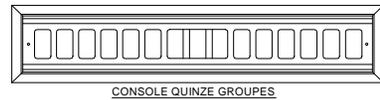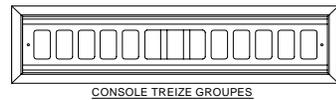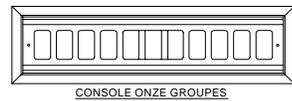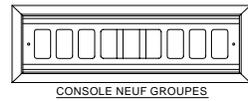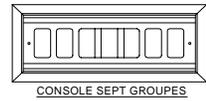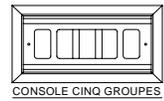

LEGENDE			
GAZ MEDICAUX			
ID	QTE	DESCRIPTION	
O <sub>2</sub>	-	SORTIE D'OXYGENE	Q.C. <input type="checkbox"/> OU D.I.S.S. <input type="checkbox"/>
A	-	SORTIE D'AIR MEDICAL	Q.C. <input type="checkbox"/> OU D.I.S.S. <input type="checkbox"/>
V	-	SORTIE DE VIDE MEDICAL	Q.C. <input type="checkbox"/> OU D.I.S.S. <input type="checkbox"/>
N <sub>2</sub>	-	SORTIE D'AZOTE	D.I.S.S. SEULEMENT <input type="checkbox"/>
N <sub>2</sub> O	-	SORTIE DE PROTOXYDE D'AZOTE	Q.C. <input type="checkbox"/> OU D.I.S.S. <input type="checkbox"/>
EVAC	-	SORTIE D'EVACUATION	Q.C. <input type="checkbox"/> OU D.I.S.S. <input type="checkbox"/>
CO <sub>2</sub>	-	SORTIE DE DIOXYDE DE CARBONE	D.I.S.S. SEULEMENT <input type="checkbox"/>
ELECTRICITE ET COMMUNICATION			
SI	-	RECEPTACLE SIMPLE, 15A, 125V, H.G., (IVOIRE) COURANT NORMAL - HBL8210I	
SR	-	RECEPTACLE SIMPLE, 15A, 125V, H.G., (ROUGE) COURANT D'URGENCE - HBL8210R	
DI	-	RECEPTACLE DOUBLE, 15A, 125V, H.G., (IVOIRE) COURANT NORMAL - HBL8200HI	
DR	-	RECEPTACLE DOUBLE, 15A, 125V, H.G., (ROUGE) COURANT D'URGENCE - HBL8200HR	
NC	-	PROVISION APPEL DE GARDE, 3 GROUPES - GW-335-G (AUCUNE PLAQUE)	
DP	-	PROVISION DATA, 1 GROUPE - GW-135-G (AUCUNE PLAQUE)	
TP	-	PROVISION TELEPHONE, 1 GROUPE - GW-135-G (AUCUNE PLAQUE)	
B	-	ESPACE VIDE, 1 GROUPE, AVEC PLAQUE INOX	
ACCESSOIRES			
SL	-	GLISSIERE POUR BOUTEILLE DE VIDE MEDICAL	
AUTRES SERVICES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES. CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.			

### MODÈLE DE SÉCURITÉ OUVERTURE DE LA PORTE A 180° VERS LE BAS

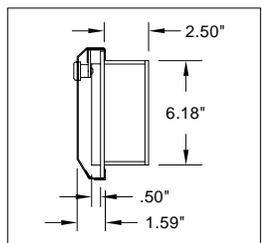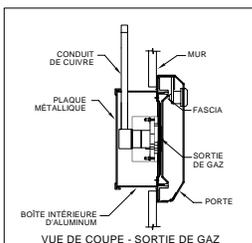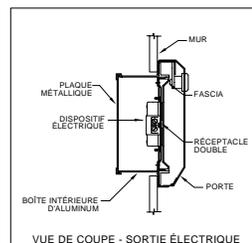

NOMBRE DE GROUPES		5	7	9	11	13	15	17	19	21
OUVERTURE DANS LE MUR	A	13.800"	18.550"	23.300"	28.050"	32.800"	37.550"	42.300"	47.050"	51.800"
CHÂSSIS LONGUEUR TOTALE	B	15.125"	19.875"	24.625"	29.375"	34.125"	38.875"	43.625"	48.375"	53.125"